

SET-INHALT

- **Das System besteht aus:**
 - Einer Einheit
 - Mehreren Anpassungs- und Verengungsringen
 - Konus zum Aufziehen der Ringe
 - Gleitgel
 - Anleitung mit Video (nur bei AVP 1000)
 - Tragetasche
- **AVP 1000**
 - Elektrische Vakuumpumpe (mit 3 Batterien)
 - Einfachste Anwendung mit der Hand
- **VPM 600**
 - Manuelle Vakuumpumpe
 - Starke, leicht zu betätigende Handpumpe

VORTEIL

- Schnelle Erektion
- Stärkung der Manneskraft
- Kurzfristig startbereit
- Ungefährlich
- Erektionszeit bestimmbar bis zu 30 Minuten

Vakuum-Therapie ist die einfachste Art, das Problem der Impotenz zu lösen. Sie ist sicher, einfach und kostengünstig. Kontraindikationen sind nicht bekannt.

Vakuum-Therapie funktioniert durch ein mechanisch erzeugtes Vakuum, das eine gute Erektion erzielt, ohne auf einen chirurgischen Eingriff, auf Injektionen oder auf Tabletten zurückgreifen zu müssen. Vakuum-Therapie mit **POS-T-VAC®** kann uneingeschränkt angewendet werden.

Ein Plastikzylinder wird zuerst über den Penis bis an den Körper herangedrückt. Das Vakuum wird erzeugt und Blut strömt in das Glied. Dieser verstärkte Blutfluß vergrößert und versteift den Penis, um eine sexuelle Vereinigung zu ermöglichen. Es dauert nicht lange, dann tritt eine Versteifung ein. Ein elastischer Ring wird über den Penis gestülpt, der den venösen Rückfluß verhindert. Die Versteifung bleibt konstant und der Zylinder wird entfernt.

BESTELLUNG

- **Elektrische Vakuumpumpe**

Bestell-Nr.

AVP 1000

- **Handpumpe**

Bestell-Nr.

VPM 600

